



I-FACE LIFTING TWARZY EMS ELEKTROSTYMULACJA

37500 zł brutto

 [Przejdź na stronę produktu](#)

I-FACE ESTHETIC – PROFESJONALNE URZĄDZENIE DO ELEKTROSTYMULACJI TWARZY (EMS)

I-FACE ESTHETIC – PROFESJONALNE URZĄDZENIE DO ELEKTROSTYMULACJI TWARZY (EMS) Z TABLETEM I SYSTEMEM PATCHY

I-FACE ESTHETIC to zaawansowane urządzenie do NIEINWAZYJNEJ ELEKTROSTYMULACJI MIĘŚNI I TKANEK TWARZY (EMS), stworzone z myślą o profesjonalnych gabinetach kosmetycznych. Technologia niskoczęstotliwościowych, symetrycznych prądów bipolarnych wspiera zabiegi ukierunkowane na UJĘDRNIENIE, LIFTING, REDUKCJĘ ZMARSZCZEK MIMICZNYCH ORAZ POPRAWĘ KONDYCJI SKÓRY – w sposób komfortowy dla klienta i łatwy w standaryzacji w salonie.

Urządzenie działa w oparciu o DEDYKOWANE, JEDNORAZOWE ELEKTRODY W FORMIE PATCHY (z medycznym żelazem przewodzącym), które przenoszą impulsy na wybrane partie twarzy. Dzięki temu zabieg jest higieniczny, szybki w przygotowaniu i powtarzalny.

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI DLA GABINETU

*

ZAUWAŻALNE NAPIĘCIE I "EFEKT ŚWIEŻOŚCI" już po pierwszej sesji (subiektywne odczucie "ściągnięcia" skóry jest częste).

*

Wsparcie protokołów: ANTI-AGING, LIFTING, UJĘDRNIANIE, DRENAŻ, POPRAWA MIKROKRAŻENIA.

*

ZABIEG BEZINWAZYJNY I BEZBOLESNY – dobrze sprawdza się jako samodzielna usługa lub element terapii łączonych.

*

TABLETOWE STEROWANIE I GOTOWE PROGRAMY – łatwa obsługa i szybkie wdrożenie personelu.

PROGRAMY ZABIEGOWE (7 + TRYB KOMPLEKSOWY)

Wbudowane programy pozwalają dobrać terapię do potrzeb skóry i napięcia mięśni:

*

REJUVENATION – wiotkość i drobne zmarszczki, poprawa tekstury i napięcia

*

DRAINAGE – pobudzenie krążenia i wsparcie drenażu limfatycznego (mniej "opuchnięta" twarz)

*

EXTREME FLACCIDITY – intensywniejsza praca przy większej wiotkości

*

LIFTING – ujędrnienie i redefinicja owalu

*

INCREASE BLOOD FLOW – lepsze dotlenienie i odżywienie skóry

*

RELAX – rozluźnienie napięć mięśniowych

*

FACIAL MAINTENANCE – program podtrzymujący: tonizacja + relaks + krążenie

*

PROGRAM INTEGRALNY (FULL FACE) – kompleksowa stymulacja całej twarzy.

JAK WYGLĄDA ZABIEG W PRAKTYCE:

*

Oczyszczenie skóry (bez makijażu).

*

Podłączenie patchy (kolorystycznie przypisane do obszarów).

*

Aplikacja patchy na: CZOŁO, POLICZKI, BRODĘ (nie aplikować blisko oczu).

*

Start programu i STOPNIOWE ZWIĘKSZANIE INTENSYWNOŚCI według tolerancji klienta.

*

Po zakończeniu – delikatne usunięcie patchy, utylizacja (jednorazowe).

CZAS SESJI: standardowo 20 MINUT (możliwość regulacji czasu w systemie).

ZALECANA CZĘSTOTLIWOŚĆ (ORIENTACYJNIE): co 3–5 DNI PRZEZ 4 TYGODNIE, a efekt może utrzymywać się ok. 6–9 MIESIĘCY (dla podtrzymania wyników rekomenduje się cykle przypominające).

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:

W komplecie otrzymujesz:

*

URZĄDZENIE I-FACE ESTHETIC – 1 szt.

*

PRZEWÓD ZASILAJĄCY – 1 szt.

*

PATCHES / ELEKTRODY JEDNORAZOWE – 200 SZT.

*

PASEK (BELT/VELCRO) – 1 szt.

*

TABLET – 1 szt.

*

SAFETY BOX (moduł bezpieczeństwa) z przyciskiem awaryjnym i okablowaniem do elektrod – 1 szt.

PATCHES KOLORYSTYCZNE WG STREF:

*

CZERWONY – CZOŁO

*

NIEBIESKIE – POLICZKI

*

ZIELONY – BRODA

(Uwaga praktyczna: elektrody są kompatybilne z różnymi strefami, jednak w zestawie zastosowano rozróżnienie kolorami dla wygody.)

DLA KOGO JEST TEN PRODUKT:

Dla PROFESJONALNYCH GABINETÓW KOSMETOLOGICZNYCH, które chcą wprowadzić lub rozbudować ofertę o zabiegi:

*

ujędrniające i liftingujące,

*

anti-aging,

*

poprawiające krążenie i dotlenienie skóry,

*

redukujące oznaki zmęczenia (worki/cienie, “opuchnięcie”),

*

wspierające stymulację kolagenu.

PRZECIWWSKAZANIA (NAJWAŻNIEJSZE):

Nie stosować m.in. u osób:

*
w ciąży,
*
z rozrusznikiem lub implantami medycznymi zasilanymi baterią,
*
z chorobami serca, arytmia, epilepsją, ciężkim nadciśnieniem, cukrzycą,
*
po dużych operacjach (zależnie od rekonwalescencji – po konsultacji lekarskiej),
*
z ranami/uszkodzeniami skóry w obszarze zabiegowym,
*
z zaburzoną czuciem w obrębie twarzy.

DANE TECHNICZNE:

*
Zasilanie: 110–220 V
*
Tryb pracy: CIĄGŁY, kanały izolowane (twarz/czoło/broda)
*
Częstotliwość pracy: 1–20 HZ
*
Szerokość impulsu: 2–100 μ S
*
Natężenie regulowane: 0–36 MA (obciążenie 500–1000 Ω)
*
Timer: 0–25 MIN
*
Łączność: BLUETOOTH CLASS 1 (zasięg do ok. 100 M między tabletem a modułem)
*
Wyświetlacz: DOTYKOWY (TABLET)
*
Wymiary urządzenia: ok. 40–43 × 22–23 × 13 CM
*

Waga: OK. 6 KG

*

Elektrody: 4 × 4 CM, z medycznym żelem przewodzącym, JEDNORAZOWE: