



BARBICIDE SPRAY DO DEZYNFEKCJI 1000ML

 [Przejdź na stronę produktu](#)

Skuteczna dezynfekcja powierzchni Gotowy do natychmiastowego użycia płyn w spray'u do profesjonalnej dezynfekcji powierzchni w gabinetach kosmetycznych, salonach fryzjerskich, solariach, ośrodkach SPA i fitness oraz gabinetów masażu, manicure, pedicure i tatuażu. Nowoczesna technologia na bazie czwartorzędowych związków amoniowych bez etanolu, aldehydów i fenoli to pełna ochrona przed zakażeniami.

SZEROKIE SPEKTRUM DZIAŁANIA

Skutecznie niszczy wszystkie bakterie (m.in.: gronkowce jak MRSA, Pseudomonas a., Enterococcus h., prątki gruźlicy Tbc, Escherichia Coli), grzyby (Candida albicans) oraz wirusy łącznie z BVDV, Vaccinia, HIV (AIDS), H1N1, HBV i HCV (Wirusowe Zapalenie Wątroby typu B i C). Bezpieczny dla zdrowia Bez aldehydów i fenoli, nie wywołuje reakcji alergicznych i podrażnień. Bezpieczny dla narzędzi i akcesoriów Bezpieczeństwo stosowania w przypadku dezynfekcji powierzchni akrylowych (solarium), stali szlachetnej, ceramiki, plastiku, grzebieni, szczotek, wałków, prostownic, lokówek, nożyczek, urządzeń, leżanek, foteli, umywalek, mebli, podłóg oraz pozostałych akcesoriów kosmetycznych i

fryzjerskich. Spray posiada formułę ochrony przed rdzewieniem. Nie pozostawia plam na skórze ani na zabrudzonych powierzchniach.

STOSOWANIE

Szybka dezynfekcja do wszystkich powierzchni. Spryskać powierzchnię preparatem BARBICIDE, odczekać wymagany czas kontaktu preparatu z powierzchnią i wytrzeć. Do usunięcia z powierzchni mechanicznych zabrudzeń poleca się Chusteczki dezynfekcyjne Barbicide, a następnie spryskanie powierzchni Spray'em.

CZAS DEZYNFEKCJI: minimum 1 minuta, zalecane do pełnego działania 3 minuty.

DEZYNFEKCJA ZGODNA Z PRZEPISAMI

Zgodny z normami europejskimi: EN 14561 (aktywność przeciwbakteryjna), EN 14562 (dezynfekcja sprzętu medycznego), EN 14476 (aktywność wirusobójcza), EN 13624 (aktywność grzybobójcza) i EN 13727 (aktywność przeciwbakteryjna).

Skutecznie przetestowany według przepisów Niemieckiego Towarzystwa Higieny i Mikrobiologii (DGHM) oraz Stowarzyszenia Higieny Stosowanej (VAH).
Dopuszczony do obrotu przez polski Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.