



## **ENDERMO-SHAPER 360 ENDERMOMASAŻ**

52900 zł brutto

 [Przejdź na stronę produktu](#)

### INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Dla bezpieczeństwa używaj urządzenia zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą. Urządzenie o zastosowaniu niemedyceznym, przewidziane do stosowania również przez osoby bez wykształcenia medycznego (po wcześniejszym przeszkoleniu oraz zapoznaniu się z instrukcją użytkowania).

### NOWOCZESNE URZĄDZENIE DO ENDERMOMASAŻU

Nowoczesne, kosmetyczne urządzenie do endermomasażu wyposażone w 4 GŁOWICE ZABIEGOWE, umożliwiające wykonywanie zabiegów na różnych obszarach ciała oraz twarzy. Technologia zastosowana w urządzeniu opiera się na TERAPII PRÓŻNIOWEJ (PODCIŚNIENIE) POŁĄCZONEJ Z MECHANICZNYM MASAŻEM ROLKOWYM, co pozwala na skuteczną stymulację tkanek oraz poprawę kondycji skóry.

## CZYM JEST ENDERMOMASAŻ?

Endermomasaż jest nieinwazyjną metodą terapii próżniowej połączonej z działaniem samojezdnych rolek. Zabieg polega na zasysaniu fałdu skórniego przy jednoczesnym mechanicznym masażu, co prowadzi do intensywnej stymulacji tkanek.

Podciśnienie rozszerza naczynia krwionośne oraz pobudza mikrokrążenie, co przyczynia się do zwiększenia metabolizmu komórkowego oraz usprawnienia procesów detoksykacyjnych w organizmie. Ruch rolek stymuluje układ limfatyczny, wspierając naturalny drenaż limfatyczny i odprowadzanie nadmiaru płynów z tkanek.

Regularne zabiegi pomagają poprawić napięcie skóry, wygładzić jej strukturę oraz wspierać procesy regeneracyjne.

## GŁOWICE ZABIEGOWE

Urządzenie wyposażone jest w 4 GŁOWICE ZABIEGOWE, które umożliwiają pracę na różnych obszarach ciała i twarzy.

### GŁOWICA NA TALIĘ I BRZUCH – 60 CM<sup>2</sup>

\*

terapia podciśnieniowa

\*

mechaniczny masaż rolkowy

\*

przeznaczona do większych obszarów ciała

### GŁOWICA NA RAMIONA I UDA – 30 CM<sup>2</sup>

\*

podciśnienie wspomagające drenaż limfatyczny

\*

masaż mechaniczny rolek stymulujący tkanki

### GŁOWICA NA TWARZ I SZYJĘ – 5 CM<sup>2</sup>

\*

delikatne podciśnienie

\*

precyzyjna stymulacja skóry

### GŁOWICA NA OKOLICE OCZU – 1,5 CM<sup>2</sup>

\*  
przeznaczona do pracy w najbardziej wymagających i delikatnych obszarach

## TECHNOLOGIE ZASTOSOWANE W URZĄDZENIU

Urządzenie wykorzystuje dwie podstawowe technologie zabiegowe:

### 1. PODCIŚNIENIE (VACUUM)

\*  
wspiera drenaż limfatyczny

\*  
pobudza mikrokrążenie

\*  
ułatwia odprowadzanie nadmiaru płynów z tkanek

### 2. MECHANICZNY MASAŻ ROLKOWY

\*  
intensywna stymulacja tkanek

\*  
poprawa elastyczności skóry

\*  
wsparcie terapii antycellulitowych

-----  

### TRYBY PRACY ROLEK

#### ROTACJA PRZÓD

\*  
modelowanie sylwetki

\*  
zmniejszenie obrzęków

\*  
poprawa napięcia skóry

#### ROTACJA WSTECZNA

\*  
modelowanie sylwetki

\*

stymulacja tkanek

ROTACJA WEWNĘTRZNA

\*

poprawa wyglądu skóry

\*

pobudzenie mikrokrążenia

ROTACJA ZEWNĘTRZNA

\*


wygładzenie skóry

\*

poprawa jędrności

\*Produkt nie służy do lipolizy ani usuwania tkanki tłuszczowej.

Pobór mocy	1000W
Podciśnienie	40-90Kpa
Prędkość rolki	120RPM
Kierunki rotacji rolki	4 kombinacje
Napięcie	220-230V
Wyświetlacz	LCD, dotykowy, 10"
Wymiary	56x47x110

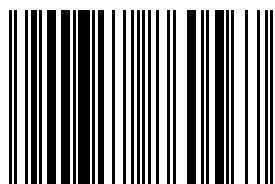

5904358860567