



GALAXIA NANO NANOIGŁOWY RF FRAKCYJNY

7000 zł brutto

 [Przejdź na stronę produktu](#)

OPIS TECHNOLOGII

Nanoigłowa fala radiowa to zaawansowane, niechirurgiczne rozwiązanie ablacyjne mające na celu odnowę skóry – poprawę jej wyglądu i kondycji. Jest skutecznie wykorzystywane w przypadku zróżnicowanych problemów skórnych – również tych nakładających się na siebie.

Skoncentrowane fale o częstotliwości radiowej, za pomocą nanoigieł bezpośrednio przekazują ciepło aż do skóry właściwej nie naruszając jej zewnętrznych warstw. Ciepło dostarczane jest w sposób bezpieczny i niezwykle precyzyjny – dokładnie w strefę występowania zaburzenia. Technologia pozwala dopasować ilość energii do indywidualnych cech pacjenta i problemów, z którymi się boryka.

Zabieg ma na celu wywołanie w głębi skóry mikrouszkodzeń, które stymulują tkanki do

aktywnej samoregeneracji, a przez to redukcję niedoskonałości widocznych na zewnątrz. Podrażnione fibroblasty zwiększają produkcję kolagenu w celu naprawy uszkodzonej tkanki. Następuje przemodelowanie istniejącego kolagenu, odbudowa naczynek krwionośnych, a w efekcie odbudowanie się skóry od wewnątrz. Nierówności skóry wyrównują się, zaburzenia pigmentacji – niwelują poprzez wchłonięcie nadmiaru barwnika.

Co ważne, uszkodzenia termiczne skóry są wywoływane dokładnie w miejscu występowania niedoskonałości, a jednocześnie – w porównaniu do innych technologii – są niezwykle małe. Dzięki temu udaje się znacząco skrócić okres gojenia, a tym samym – czas rekonwalescencji, zminimalizować skutki uboczne, a także zredukować do minimum ewentualne uczucie dyskomfortu podczas samego zabiegu.

Metoda najlepsze efekty przynosi w serii zabiegów – od 2 do 4 – wykonywanych w odstępach 4-6 tygodniowych. Dokładna liczba sesji zależy od specyfiki leczonego obszaru i problemu, a także indywidualnych cech pacjenta. Każdorazowo przebieg terapii planowany jest przez specjalistę, po przeprowadzeniu wnikliwego wywiadu. W trakcie trwania terapii zalecane jest unikanie bezpośredniej ekspozycji skóry na słońce i stosowanie preparatów z silnymi filtrami UVA i UVB.

Metoda przeznaczona jest przede wszystkim do zabiegów na twarz, jednakże może być wykorzystywana również w terapiach innych partii ciała. Daje świetne rezultaty m.in. w przypadku szyi i dłoni. Widocznie poprawia wygląd i kondycję skóry, która staje się grubsza, a zarazem lepiej odżywiona, bardziej elastyczna i pozbawiona niedoskonałości.

OPIS ZABIEGU

Terapię z wykorzystaniem nanoigłowej fali radiowej powinien poprzedzić wywiad dotyczący stanu zdrowia i kondycji skóry pacjenta, w trakcie którego należy m.in. ustalić pożądane efekty leczenia, a także ewentualne przeciwwskazania.

Sam zabieg rozpoczyna oczyszczenie skóry poddawanej terapii. Za pomocą odpowiedniej głowicy specjalista kieruje wiązki fal radiowych precyzyjnie w miejsca, w których występują niedoskonałości – blizny, rozstępy, zmarszczki itp. Energia przekazywana jest w głąb skóry powodując mikrouszkodzenia, bez niepotrzebnego uszkodzenia naskórka. W wyniku podwyższenia temperatury tkanek, skóra staje się lekko zaczerwieniona i nieco zaogniona. Może wystąpić również lekki obrzęk, a w kolejnych dniach – uczucie suchości i napięcia skóry. To naturalne reakcja towarzysząca procesowi samoregeneracji, która w zależności od indywidualnych predyspozycji i wrażliwości ustępuje w ciągu maksymalnie kilku dni.

Zabieg nie jest bolesny, jednak może się wiązać z niewielkim dyskomfortem podobnym do intensywnego ciepła jakie czujemy np. podczas opalania. Istnieje możliwość zastosowania łagodnego kremu przeciwbólowego, jednak nie jest to rekomendowane, gdyż może zmniejszyć efekty zabiegu.


Czas trwania zabiegu zależy bezpośrednio od leczonego obszaru. Zazwyczaj trwa od 20 minut do godziny. Bezpośrednio po zabiegu zaleca się stosowanie preparatów kojących

skórę i przyspieszających proces gojenia, a także chronienie skóry przed bezpośrednią ekspozycją na słońce. Po upływie 3 dni można wznowić dotychczasową pielęgnację domową, zaś po minimum 5 – wprowadzić bardziej aktywne preparaty.

EFEKTY

- * widoczna poprawa tekstury skóry – jej napięcia, jędrności i elastyczność,
- * redukcja widocznych zmarszczek i zmian związanych ze starzeniem się skóry,
- * redukcja blizn pourazowych i potrądzikowych,
- * redukcja rozstępów,
- * zwężenie rozszerzonych porów,
- * leczenie trądziku różowatego,
- * poprawa kolorytu skóry poprzez redukcję zaburzeń pigmentacyjnych i przebarwień różnego typu, w tym plam posłonecznych i starczych,
- * ogólna poprawa kondycji skóry, odmłodzenie jej poprzez stymulację fibroblasty i odbudowę włókien kolagenowych.

| | |
|-------------------------------------|---|
| Rodzaj RF | bipolarny |
| Kartridże | bipolarny, frakcyjny nano 36, frakcyjny nano 64 |
| Głębokość penetracji kartridża nano | 0,1mm |
| Tryby | ciągły, przerywany |
| Moc wyjściowa RF | 150W |
| Częstotliwość RF | 1Mhz |
| Pobór mocy | 200W |
| Częstotliwość | 50-60Hz |
| Wymiary urządzenia | 32x18x7cm |

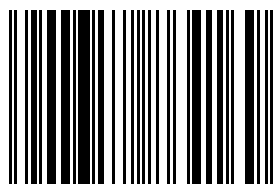

5904358864169