



## **KOMBAJN KOSMETYCZNY MOBILNY 15W1**

16800 zł brutto

 [Przejdź na stronę produktu](#)

KOMBAJNY MOBILNE NAJNOWSZEJ GENERACJI (WYPRODUKOWANE W POLSCE).

CO WYRÓŻNIA NASZĄ OFERTĘ?

- Gwarancja 24 miesiące,
- Bezpłatne konsultacje z serwisantem,
- BEZPŁATNE, PROFESJONALNE SZKOLENIE  
(WŁĄCZNIE Z OPIEKĄ TELEFONICZNĄ PO SZKOLENIU),
- Bezpłatne skrypty szkoleniowe,

-Wieloletnie doświadczenie.

#### CO WYRÓŻNIA NASZE URZĄDZENIA?

-Zgodność aparatury z normami europejskimi potwierdzona deklaracjami zgodności producenta,

-Urządzenia zostały zaprojektowane od podstaw w Polsce, w oparciu tylko i wyłącznie o europejskie podzespoły,

-Zastosowanie najwyższej jakości podzespołów i materiałów uczyniło nasze kombajny bezawaryjnymi, zostawiając w tyle podobne urządzenia,

-Nowoczesny design i staranność wykonania, zadowalająca nawet najbardziej wymagających klientów,

-Doskonała proporcja między ceną, jakością, oraz ilością funkcji urządzenia,

-Nowe technologie, dostępne tylko w naszych kombajnach,

-Urządzenia wykonane są na indywidualne zamówienie,

-Tylko u nas możecie Państwo zamówić urządzenie w dowolnej kolorystyce, z logo swojego gabinetu!

#### OFERTA DOTYCZY KOMBAJNU KOSMETYCZNEGO WYPOSAŻONEGO W FUNKCJE:

##### SEGMENT NR1

- Peeling kawitacyjny,
- Sonofoforeza,
- Światłoterapia LED, kolor czerwony i niebieski ,
- Ultradźwięki,
- Galwan,
- Jonofoforeza,
- Elektrostymulacja prądem niskiej częstotliwości,
- Mezoterapia bezigłowa twarzy i ciała,
- Mikrodermabrazja diamentowa,
- Dermomasaż.

##### Segment nr2

- Fale radiowe bipolarne,
- Laser w głowicach fal radiowych,

- Liposukcja ultradźwiękowa,
- Głowica infrared.

#### OPIS FUNKCJI:

- Peeling kawitacyjny, ultradźwięki, sonoforeza, światłoterapia LED, kolor czerwony i niebieski, galwan, jonoforeza, elektrostymulacja prądem niskiej częstotliwości:

Kawitacja to zjawisko powstające na powierzchni skóry pod wpływem działania fali ultradźwiękowej i cieczy. W warstwie rogowej powstają pęcherzyki powietrza, które w wyniku zmiennego, wewnątrzcząsteczkowego ciśnienia ulegają mini eksplozjom, wytwarzając mikro energię, która usuwa martwe już kerneocyty.

#### Zalety:

- Mechaniczne i przyjemne oczyszczanie cery,
- Urządzenie do pracy ciągłej,
- 3 rodzaje sterowania łopatką,
- Łączenie z jonoforezą,
- 2 głowice ultradźwiękowe o ergonomicznych kształtach.

- Mezoterapia bezigłowa twarzy i ciała, mezoterapia bezigłowa trychologiczna:

Mezoterapia bezigłowa to zabieg polegający na wprowadzaniu substancji aktywnych do skóry w wyniku zjawiska elektroporacji. Mechanizm ten wykorzystuje TRANSDERMALNY SYSTEM TERAPEUTYCZNY TTS polegający na wprowadzaniu określonej substancji leczniczej do organizmu przez warstwę naskórka i skóry właściwej z wykorzystaniem optymalnego połączenia sonoterapii (sonoforeza) z impulsami prądowymi (jonoforeza). Mezoterapia bezigłowa stanowi doskonałą alternatywę dla mezoterapii igłowej.

#### Programy zabiegowe:

- Okolice oczu,
- Revital 20+,

- Revital 30+,
- Odmładzanie 40+,
- Lifting 45+,
- Trądzik,
- Ujędrnianie,
- Cellulit,
- Wyszczuplenie,
- Rozstępy,
- Na skórę głowy,
- Na bóle mięśni.

#### Działanie:

- Błyskawiczny lifting twarzy,
- Poprawa kolorytu skóry,
- Działanie odmładzające i regenerujące,
- Dotlenienie i odżywienie tkanek,
- Modelowanie.

-Fale radiowe Bipolarne, laser w głowicach fal radiowych:

Fale radiowe to urządzenie emitujące falę elektromagnetyczną o częstotliwości radiowej, której działaniem biologicznym jest wytworzenie diatermi w obrębie skóry właściwej. W wyniku działania ciepła fibroblasty zostają pobudzone do produkcji kolagenu, a obecne włókna kolagenowe ulegają regeneracji, dając efekt liftu skóry.

#### Efekty działania:

- Ujędrnienie i poprawa owalu twarzy,
- Szybkie spłycenie zmarszczek,
- Możliwość stosowania kosmetyków podczas zabiegu,
- Likwidacja cieni pod oczami,
- Odmłodzenie i regeneracja,
- Pobudzenie komórek skóry do produkcji kolagenu i elastyny,
- Ujędrnienie i modelowanie, poprawa ukrwienia wybranych partii ciała,
- Skuteczna walka z cellulitem.

#### -MIKRODERMABRAZJA DIAMENTOWA:

Mikrodermabrazja diamentowa to zabieg w pełni kontrolowanego złuszczenia warstwy rogowej naskórka za pomocą głowic diamentowych o różnej gradacji z płynną regulacją podciśnienia.

W efekcie uzyskujemy odświeżenie skóry i stymulację podciśnieniem w procesie wytwarzania kolagenu.

Działanie:

- Rozjaśnianie przebarwień skóry,
- Spłycenie blizn,
- Stymulacja krążenia dzięki miejscowemu przekrwieniu,
- Oczyszczanie cery,
- Likwidacja zmarszczek.

#### -LIPOSUKCJA ULTRADŹWIĘKOWA, GŁOWICA INFRARED:

Poprzez działanie ultradźwiękami o określonej, niskiej częstotliwości wpływamy na powstanie zjawiska kawitacji. Wytworzona energia powoduje rozbięcie komórki tłuszczowej, a uwolnione w ten sposób tłuszcze (wolne kwasy tłuszczowe i glicerol) są głównie transportowane przez układ naczyniowy i limfatyczny do wątroby, gdzie ulegają przemianom materii i stają się źródłem energii. W ten sposób można przyspieszyć efekt redukcji nadmiaru tkanki tłuszczowej z „trudnych” obszarów, np. ud, pośladków, talii, bioder czy ramion.

Urządzenie posiada również głowicę na podczerwień IR – ogrzanie partii przed jej nadźwiękowaniem, sprzyja „upłynnieniu tkanki tłuszczowej” i głębszemu wnikananiu fali ultradźwiękowej. Połączenie tych dwóch bodźców sprawia, że efekty kuracji są bardzo widoczne a zabieg jest doskonałą alternatywą dla interwencji chirurgicznych.

Działanie:

- Niwelacja tkanki tłuszczowej,
- Odmłodzenie i regeneracja,
- Dotlenienie i odżywienie tkanek,
- Modelowanie partii ciała.

#### -DERMOMASAŻER:

Dermomasażer to urządzenie do wykonywania masażu podciśnieniowego, którego głównym działaniem jest rozpad "zrazików" tłuszczowych i przywrócenie prawidłowego funkcjonowania naczyń włosowatych i limfatycznych w skórze. Dermomasażer jest odpowiednikiem masażu ręcznego, często stosowanego w fizykoterapii przywrócenie

prawidłowego funkcjonowania naczyń włosowatych i limfatycznych w skórze. Dermomasażer jest odpowiednikiem masażu ręcznego, często stosowanego w fizykoterapii.

Działanie:

- Modelowanie ciała – redukcja tkanki tłuszczowej,
- Zmniejszenie cellulitu,
- Ujędrnienie ciała,
- Wspomaganie drenażu limfatycznego,
- Poprawa ukrwienia i odżywienia skóry,
- Spłycenie blizn,
- Niwelacja rozstępów,
- Możliwość stosowania wraz z kosmetykami.

-ANALIZER SKÓRY:

PEELING KAWITACYJNY, ULTRADŹWIĘKI, SONOFOREZA, ŚWIĄTŁOTERAPIA LED, KOLOR CZERWONY I NIEBIESKI, GALWAN, JONOFOREZA, ELEKTROSTYMULACJA PRĄDEM NISKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Czas pracy                           | 0-30 min                 |
| Bezpiecznik                          | 1,2A                     |
| Napięcie                             | 230 V-50Hz               |
| Częstotliwość peelingu kawitacyjnego | 25KHz                    |
|                                      | Łopatka do pracy ciągłej |
| Światłoterapia                       | kolor czerwony           |
| Światłoterapia                       | kolor niebieski          |
| Prąd galwaniczny                     | +/- 6mA                  |
| Częstotliwość ultradźwięków          | 1Mhz                     |
| Max. moc głowic UD                   | 1W/cm2                   |

MEZOTERAPIA BEZIGŁOWA TWARZY I CIAŁA, MEZOTERAPIA BEZIGŁOWA  
TRYCHOLOGICZNA

|                                    |                                              |
|------------------------------------|----------------------------------------------|
| Zakres czasu pracy                 | 30 sekund-40 minut (ze skokiem co 30 sekund) |
| Częstotliwość ultradźwiękowa       | 1 MHz                                        |
| Napięcie wejściowe                 | 220-230V                                     |
| Moc wyjściowa                      | 0,04 W/cm 2-0,28 W/cm2                       |
| Zakres natężenia                   | 0,0 mA-6,4 mA                                |
| Zakres skali pulsacji(wypełnienia) | 5%:100%                                      |

FALE RADIOWE BIPOLARNE, LASER W GŁOWICACH FAL RADIOWYCH

|                |            |
|----------------|------------|
| Czas pracy     | 0-30 min   |
| Bezpiecznik    | 1,6A       |
| Napięcie       | 230 V-50Hz |
| Moc urządzenia | 120W       |
| Częstotliwość  | 1MHz       |
| Intensywność   | 5-100W     |

MIKRODERMABRAZJA DIAMENTOWA

|                                                  |                      |
|--------------------------------------------------|----------------------|
| Czas pracy                                       | 0-30 min             |
| Moc                                              | 60 W                 |
| Bezpiecznik                                      | 1,2A                 |
| Napięcie                                         | 230 V-50Hz           |
| Max podciśnienie mierzone na zakończeniu głowicy | -600 hPa (-0.06 MPa) |


LIPOSUKCJA ULTRADŹWIĘKOWA, GŁOWICA INFRARED

|             |            |
|-------------|------------|
| Moc         | 35W        |
| Bezpiecznik | 1,2A       |
| Napięcie    | 230 V-50Hz |

DERMOMASAŻER

|                |            |
|----------------|------------|
| Czas pracy     | 0-60 min   |
| Bezpiecznik    | 1,6A       |
| Napięcie       | 230 V-50Hz |
| Moc urządzenia | 60W        |

|              |           |
|--------------|-----------|
| Podciśnienie | 5-20 inHg |
|--------------|-----------|

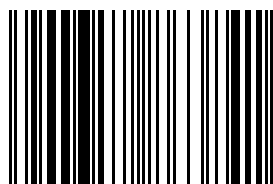

5904358863841