



KOMBAJN KOSMETYCZNY MOBILNY 20W1

20800 zł brutto

 [Przejdź na stronę produktu](#)

KOMBAJNY MOBILNE NAJNOWSZEJ GENERACJI (WYPRODUKOWANE W POLSCE).

CO WYRÓŻNIA NASZĄ OFERTĘ?

- Gwarancja 24 miesiące,
- Bezpłatne konsultacje z serwisantem,
- Bezpłatne, profesjonalne szkolenie (włącznie z opieką telefoniczną po szkoleniu),
- Bezpłatne skrypty szkoleniowe,

-Wieloletnie doświadczenie.

CO WYRÓŻNIA NASZE URZĄDZENIA?

-Zgodność aparatury z normami europejskimi potwierdzona deklaracjami zgodności producenta,

-Urządzenia zostały zaprojektowane od podstaw w Polsce, w oparciu tylko i wyłącznie o europejskie podzespoły,

-Zastosowanie najwyższej jakości podzespołów i materiałów uczyniło nasze kombajny bezawaryjnymi, zostawiając w tyle podobne urządzenia,

-Nowoczesny design i staranność wykonania, zadowalająca nawet najbardziej wymagających klientów,

-Doskonała proporcja między ceną, jakością, oraz ilością funkcji urządzenia,

-Nowe technologie, dostępne tylko w naszych kombajnach,

-Urządzenia wykonane są na indywidualne zamówienie,

-Tylko u nas możecie Państwo zamówić urządzenie w dowolnej kolorystyce, z logo swojego gabinetu!

Oferta dotyczy kombajnu kosmetycznego wyposażonego w funkcje:

SEGMENT NR1

- Peeling kawitacyjny,
- Sonofoforeza,
- Światłoterapia LED, kolor czerwony i niebieski,
- Ultradźwięki,
- Galwan,
- Jonofoforeza,
- Elektrostymulacja prądem niskiej częstotliwości,
- Mezoterapia bezigłowa twarzy i ciała,
- Mezoterapia bezigłowa trychologiczna,
- Mikrodermabrazja diamentowa,
- Dermomasaż,
- Analizer skóry,
- Podciśnieniowy lifting z TENS.

SEGMENT NR2

- Fale radiowe bipolarne,
- Laser w głowicach fal radiowych,
- Mezoterapia mikroigłowa,
- Makijaż permanentny,
- Laser biostymulujący,
- Liposukcja ultradźwiękowa,
- Głowica infrared.

OPIS FUNKCJI:

-Peeling kawitacyjny, ultradźwięki, sonoforeza, światłoterapia LED, kolor czerwony i niebieski, galwan, jonoforeza, elektrostymulacja prądem niskiej częstotliwości:

Kawitacja to zjawisko powstające na powierzchni skóry pod wpływem działania fali ultradźwiękowej i cieczy. W warstwie rogowej powstają pęcherzyki powietrza, które w wyniku zmiennego, wewnątrzcząsteczkowego ciśnienia ulegają mini eksplozjom, wytwarzając mikro energię, która usuwa martwe już kerneocyty.

Zalety:

- Mechaniczne i przyjemne oczyszczanie cery,
- Urządzenie do pracy ciągłej,
- 3 rodzaje sterowania łopatką,
- Łączenie z jonoforezą,
- .-2 głowice ultradźwiękowe o ergonomicznych kształtach.

-Mezoterapia bezigłowa twarzy i ciała, mezoterapia bezigłowa trychologiczna:

Mezoterapia bezigłowa to zabieg polegający na wprowadzaniu substancji aktywnych do skóry w wyniku zjawiska elektroporacji. Mechanizm ten wykorzystuje TRANSDERMALNY SYSTEM TERAPEUTYCZNY TTS polegający na wprowadzaniu określonej substancji leczniczej do organizmu przez warstwę naskórka i skóry właściwej z wykorzystaniem optymalnego połączenia sonoterapii (sonoforeza) z impulsami prądowymi (jonoforeza). Mezoterapia bezigłowa stanowi doskonałą alternatywę dla mezoterapii igłowej.

Programy zabiegowe:

- Okolice oczu,
- Revital 20+,
- Revital 30+,
- Odmładzanie 40+,
- Lifting 45+,
- Trądzik,
- Ujędrnianie,
- Cellulit,
- Wyszczuplenie,
- Rozstępy,
- Na skórę głowy,
- Na bóle mięśni.

Działanie:

- Błyskawiczny lifting twarzy,
- Poprawa kolorytu skóry,
- Działanie odmładzające i regenerujące,
- Dotlenienie i odżywienie tkanek,
- Modelowanie.

-Fale radiowe Bipolarne, laser w głowicach fal radiowych:

Fale radiowe to urządzenie emitujące falę elektromagnetyczną o częstotliwości radiowej, której działaniem biologicznym jest wytworzenie diatermi w obrębie skóry właściwej. W wyniku działania ciepła fibroblasty zostają pobudzone do produkcji kolagenu, a obecne włókna kolagenowe ulegają regeneracji, dając efekt liftu skóry.

Efekty działania:

- Ujędrnienie i poprawa owalu twarzy,
- Szybkie spłycenie zmarszczek,
- Możliwość stosowania kosmetyków podczas zabiegu,
- Likwidacja cieni pod oczami,
- Odmłodzenie i regeneracja,
- Pobudzenie komórek skóry do produkcji kolagenu i elastyny,
- Ujędrnienie i modelowanie, poprawa ukrwienia wybranych partii ciała,
- Skuteczna walka z cellulitem.

-MIKRODERMABRAZJA DIAMENTOWA:

Mikrodermabrazja diamentowa to zabieg w pełni kontrolowanego złuszczenia warstwy rogowej naskórka za pomocą głowic diamentowych o różnej gradacji z płynną regulacją podciśnienia.

W efekcie uzyskujemy odświeżenie skóry i stymulację podciśnieniem w procesie wytwarzania kolagenu.

Działanie:

- Rozjaśnianie przebarwień skóry,
- Spłycenie blizn,
- Stymulacja krążenia dzięki miejscowemu przekrwieniu,
- Oczyszczanie cery,
- Likwidacja zmarszczek.

-MEZOTERAPIA MIKROIGŁOWA, MAKIJAŻ PERMANENTNY:

Nowoczesny system makijażu permanentnego + mezoterapii mikroigłowej z laserem biostymulacyjnym. Gwarantuje precyzyjną i stabilną pracę z dokładną regulacją wysunięcia igły. Dzięki temu nie ma obawy, że barwnik wprowadzony zostanie za głęboko i pozostawi nierówny makijaż. Umożliwia wykonanie konturu wraz z cieniowaniem.

Zastosowanie innowacyjnego materiału odpornego na ścieranie i czynniki zewnętrzne TECAPEEC gwarantuje bardzo długą i niezawodną pracę urządzenia.

Aparat wzbogacony jest o LASER BIOSTYMULUJĄCY przyspieszający gojenie skóry.

Zalety Urządzenia:

- Elektronicznie stabilizowana prędkość nakłuć,
- Precyzyjna regulacja pracy,
- Cyfrowy panel sterujący,
- Laser biostymulujący,
- Ergonomiczny kształt rączki.

- PODCIŚNIENIOWY LIFTING Z TENS:

Urządzenie to łączy dwie metody oddziaływania na skórę by zwiększyć i wzmocnić efekt liftingu. Masaż próżniowy w połączeniu z elektrostymulacją TENS działa wzmacniająco na mięśnie twarzy, ujędrnia skórę oraz stymuluje układ limfatyczny. Skrót TENS wywodzi się od (transcutaneous electrical nerve stimulation – przezskórna elektryczna stymulacja nerwów). Metoda TENS, jest znana od ponad 30 lat i szeroko stosowana na świecie. W jej

wykorzystaniu przodują: Niemcy, Anglia, Francja, Szwecja, Dania, USA, Japonia, Izrael, Rosja. Prowadzi się tam najwięcej badań nad wykorzystaniem TENS w leczeniu zaburzeń funkcji mięśni i nerwów.

Działanie:

- Pobudzeniu miejscowego ukrwienia – przyspieszenie gojenia, usunięcie obrzęków,
- Zapobieganie zanikom mięśniowym – utrzymanie mięśni w ruchu bez obciążania stawów,
- Lepsze odżywianie tkanek,
- Szybkie usunięcie produktów przemiany materii i procesów zapalnych,
- Działanie przeciwbólowe,
- Regulowanie napięcia.

Masaż próżniowy jest połączeniem masażu mechanicznego z podciśnieniem. Jednocześnie podczas zabiegu odciągane są fałdy skóry (zassanie) i rolowane ruchomymi rolkami. Masaż ten często nazywany jest lipomasażem. Podczas masażu całe ciało, z wyjątkiem piersi, masuje się przy pomocy specjalnej głowicy wyposażonej w ruchome rolki i rodzaj ssącej rury. Rolki obracają się wokół własnych osi i masują zassany do głowicy fałd skóry. Poprawia to krążenie krwi i przepycha limfę.

-LIPOSUKCJA ULTRADŹWIĘKOWA, GŁOWICA INFRARED:

Poprzez działanie ultradźwiękami o określonej, niskiej częstotliwości wpływamy na powstanie zjawiska kawitacji. Wytworzona energia powoduje rozbicie komórki tłuszczowej, a uwolnione w ten sposób tłuszcze (wolne kwasy tłuszczowe i glicerol) są głównie transportowane przez układ naczyniowy i limfatyczny do wątroby, gdzie ulegają przemianie materii i stają się źródłem energii. W ten sposób można przyspieszyć efekt redukcji nadmiaru tkanki tłuszczowej z „trudnych” obszarów, np. ud, pośladków, talii, bioder czy ramion.

Urządzenie posiada również głowicę na podczerwień IR – ogrzanie partii przed jej nadźwiękowieniem, sprzyja „upłynnieniu tkanki tłuszczowej” i głębszemu wnikananiu fali ultradźwiękowej. Połączenie tych dwóch bodźców sprawia, że efekty kuracji są bardzo widoczne a zabieg jest doskonałą alternatywą dla interwencji chirurgicznych.

Działanie:

- Niwelacja tkanki tłuszczowej,
- Odmłodzenie i regeneracja,

- Dotlenienie i odżywienie tkanek,
- Modelowanie partii ciała.

-DERMOMASAŻER:

Dermomasażer to urządzenie do wykonywania masażu podciśnieniowego, którego głównym działaniem jest rozpad "zrazików" tłuszczowych i przywrócenie prawidłowego funkcjonowania naczyń włosowatych i limfatycznych w skórze. Dermomasażer jest odpowiednikiem masażu ręcznego, często stosowanego w fizykoterapii przywrócenie prawidłowego funkcjonowania naczyń włosowatych i limfatycznych w skórze. Dermomasażer jest odpowiednikiem masażu ręcznego, często stosowanego w fizykoterapii.

Działanie:

- Modelowanie ciała – redukcja tkanki tłuszczowej,
- Zmniejszenie cellulitu,
- Ujędrnienie ciała,
- Wspomaganie drenażu limfatycznego,
- Poprawa ukrwienia i odżywienia skóry,
- Spłycenie blizn,
- Niwelacja rozstępów,
- Możliwość stosowania wraz z kosmetykami.

-ANALIZER SKÓRY:

PEELING KAWITACYJNY, ULTRADŹWIĘKI, SONOFOREZA, ŚWIATŁOTERAPIA LED, KOLOR CZERWONY I NIEBIESKI, GALWAN, JONOFOREZA, ELEKTROSTYMULACJA PRĄDEM NISKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI

Czas pracy	0-30 min
Bezpiecznik	1,2A
Napięcie	230 V-50Hz

Częstotliwość peelingu kawitacyjnego	25KHz
	Łopatka do pracy ciągłej
Światłoterapia	kolor czerwony
Światłoterapia	kolor niebieski
Prąd galwaniczny	+/- 6mA
Częstotliwość ultradźwięków	1Mhz
Max. moc głowic UD	1W/cm2

MEZOTERAPIA BEZIGŁOWA TWARZY I CIAŁA, MEZOTERAPIA BEZIGŁOWA TRYCHOLOGICZNA

Zakres czasu pracy	30 sekund:40 minut (ze skokiem co 30 sekund)
Częstotliwość ultradźwiękowa	1 MHz
Napięcie wejściowe	220:230V
Moc wyjściowa	0,04 W/cm 2:0,28 W/cm2
Zakres natężenia	0,0 mA:6,4 mA
Zakres skali pulsacji(wypełnienia)	5%:100%

FALE RADIOWE BIPOLARNE, LASER W GŁOWICACH FAL RADIOWYCH

Czas pracy	0-30 min
Bezpiecznik	1,6A
Napięcie	230 V-50Hz
Moc urządzenia	120W
Częstotliwość	1MHz
Intensywność	5-100W

MIKRODERMABRAZJA DIAMENTOWA

Czas pracy	0-30 min
Moc	60 W
Bezpiecznik	1,2A
Napięcie	230 V-50Hz
Max podciśnienie mierzone na zakończeniu głowicy	-600 hPa (-0.06 MPa)

MEZOTERAPIA MIKROIGŁOWA, MAKIJAŻ PERMANENTNY

Czas pracy	praca ciągła
Częstotliwość	60b/s-170b/s
Napięcie	230V
Moc	20W
Laser	650nm
Moc lasera	3mW

PODCIŚNIENIOWY LIFTING Z TENS


Częstotliwość	120 Hz
Natężenie prądu TENS	0 - 6.4 mA
Podciśnienie	0-0,8 bar

LIPOSUKCJA ULTRADŹWIĘKOWA, GŁOWICA INFRARED

Moc	35W
Bezpiecznik	1,2A
Napięcie	230 V-50Hz

DERMOMASAŻER

Czas pracy	0-60 min
Bezpiecznik	1,6A
Napięcie	230 V-50Hz
Moc urządzenia	60W
Podciśnienie	5-20 inHg

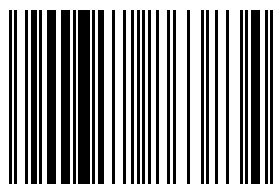

5904358863834