



EXEO URZĄDZENIE LASER Q-SWITCHED ND YAG

18950 zł brutto

 [Przejdź na stronę produktu](#)

DLA BEZPIECZEŃSTWA UŻYWAJ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ. URZĄDZENIE O ZASTOSOWANIU NIEMEDYCZNYM, PRZEWIDZIANE DO STOSOWANIA RÓWNIEŻ PRZEZ LAIKÓW (UPRZEDNIO PRZESZKOŁONYCH, ZAPOZNANYCH Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ).

ZASTOSOWANIE

- * usuwanie tatuażu,
- * usuwanie makijażu permanentnego,
- * peeling "black doll" (odmłodzenie skóry, oczyszczenie powierzchni skóry i zatkanych porów, stymulacja regeneracji i odnowy skóry)

USUWANIE TATUAŻU/MAKIAŻU PERMANENTNEGO

Laser neodymowy EXEO Q-SWITCHED skutecznie usuwa tatuaż oraz makijaż permanentny emitując krótkie impulsy światła (poniżej 10 nanosekund) Impulsy są pochłaniane w sposób selektywny przez barwnik tatuażu. Następuje rozerwanie barwnika a jego mikro-fragmenty są wchłaniane przez układ immunologiczny. Każdy kolor barwnika absorbuje inną długość fali. Zabieg jest bezpieczny, precyzyjny i nie wywołuje trwałych obrażeń skóry.

USUWANIE PRZEBARWIEŃ WSZYSTKICH TYPÓW

Usunięcie przebarwień laserem Q-switch nd yag jest możliwe dzięki wysokiej absorpcji promieni lasera w melaninie. Zabieg pozwala na likwidację przebarwień o różnym kształcie i lokalizacjach. Konieczne jest powtórzenie kilku zabiegów w serii w odstępie od 3 do 4 tygodni. Przebarwienia znikają w całości lub w rzadkich przypadkach częściowo. Po zabiegu konieczne jest stosowanie filtrów faktorem >50.

PEELING "BLACK DOLL"

Zabieg polega na "strzałach" promieniem laserowym na skórę twarzy lub dekoltu pokrytej koloidalną pastą węglową.

Drobinki węgla wnikają w najdrobniejsze nierówności oraz pory skóry, a następnie absorbują energię światła lasera nd yag, która powoduje natychmiastowe odparowanie preparatu wraz z zanieczyszczeniami.

Efektem jest oczyszczenie i zwężenie porów skóry, ujednolicenie kolorytu, stymulacja produkcji kolagenu, zmniejszenie stanu zapalnego, stymulacja komórek skóry do odbudowy oraz ustabilizowanie wydzielania sebum.

ZESTAW ZAWIERA 5 FILTRÓW


- * "Black doll" 1320nm
- * Duże obszary 1064nm (usuwanie tatuażu czarnego, szarego, granatowego)
- * Duże obszary 532nm (usuwanie tatuażu czerwonego, brązowego)
- * Małe obszary 532nm (usuwanie tatuażu czerwonego, brązowego)
- * Małe obszary 1064nm (usuwanie tatuażu czarnego, szarego, granatowego)

Producent: MLKJ WEIFANG, SINGAPORE

PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ: VENUS MICHAŁ MATUSZAK, ul. LEGIONÓW 52, 62-800 KALISZ

Typ lasera	Q switched Nd: YAG Laser
Spektrum	1064µm/532µm
Maksymalna energia	1500mj

Czas impulsu	03ns
Częstotliwość powtarzania	1-10HZ
Rozmiar plamki	3mm
Napięcie	220-230V
System chłodzenia	chłodzenie cieczą
Pobór mocy	1000W
Żywotność głowicy	500 000 impulsów

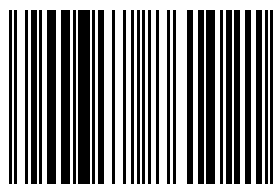

5904358861021