

# POLDERMA HYDROGEN - OCZYSZCZENIE WODOROWE



## Funkcje:

- oczyszczenie wodorowe
- hydrabrazja
- infuzja tlenowa
- fala radiowa bipolarna
- ultradźwięki
- peeling kawitacyjny
- zimny młotek

## WSKAZANIA:

Oczyszczanie wodorowe to nowa, rewolucyjna technologia wykorzystująca aktywny wodór. Posiada szerokie spektrum zastosowań.

- ☒\* przeciwdziałanie starzeniu skóry (neutralizacja wolnych rodników, ujędrnienie i odmłodzenie skóry)
- ☒\* problemy skórne (tj. trądzik, zaskórniki, zwiększona produkcja sebum, cera naczynkowa)
- ☒\* dogłębne oczyszczenie i odświeżenie skóry
- ☒\* regeneracja skóry narażonej na zanieczyszczenia znajdujące się w miejskim powietrzu
- ☒\* redukcja zmarszczek w okolicach oczu, efektu opuchnięcia oraz likwidacja cieni pod

oczami

**GŁÓWNE PRZECIWWSKAZANIA:** choroby skórne takie jak opryszczka, naruszona ciągłość skóry, choroby wewnętrzne (cukrzyca, nowotwór, zaburzenia neurologiczne, alergia, aktywna infekcja), ciąża i karmienie piersią, obecność urządzeń typu aparat słuchowy, rozrusznik serca, a także nadwrażliwość na prąd elektryczny.

**KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z ZABIEGU?**

Z efektów zabiegu mogą korzystać osoby w każdym wieku, zarówno kobiety jak i mężczyźni. Przeznaczony do praktycznie każdej skóry – trądzikowej, naczynkowej, ekstremalnie wrażliwej i atopowej. Szczególnie polecany osobom chcącym neutralizować skutki starzenia, a także mieszkającym w dużych miastach, gdzie powietrze jest bardzo zanieczyszczone i negatywnie wpływa na stan skóry.

**NA CZYM POLEGA ZABIEG?**

Skóra poddawana jest działaniu pęcherzyków wodoru zawartych w strumieniu wody o podwyższonym ciśnieniu. Wodór jest najmniejszym i najlżejszym pierwiastkiem, dlatego swobodnie przenika w głąb skóry, gdzie przekształca szkodliwe wolne rodniki tlenowe w cząsteczki wody. Działanie przypomina niezwykle dokładny peeling. W trakcie zabiegu usuwane są pozostałości makijażu, zanieczyszczenia i martwe komórki naskórka.

Najmniej inwazyjne oczyszczanie skóry, bezpieczne i bezbolesne. Wykonanie zabiegu nie jest poprzedzone żadnym przygotowaniem poza zmyciem ewentualnego makijażu.

**EFEKTY:**

Głównym efektem zabiegu jest idealnie oczyszczona, gładka, odświeżona i nawilżona skóra. Jej napięcie ulega zdecydowanej poprawie. Uaktywniają się procesy regeneracyjne. Efekty są widoczne od razu po zabiegu.

**ZALETY:**

- Możliwość łączenia zabiegu z kosmetykami,
- Szerokie zastosowanie,
- Niskie koszty zabiegowe,
- Duże zainteresowanie zabiegiem wśród klientek.

**ZABIEG URZĄDZENIEM POLDERMA HYDROGEN SKŁADA SIĘ Z 6 ETAPÓW:**

Etap pierwszy – oczyszczanie wodorowe

Wodór oczyszcza skórę na poziomie komórkowym. Redukuje i neutralizuje wolne rodniki, odpowiedzialne za starzenie się skóry.

#### Etap drugi – eksfoliacja

Peeling kawitacyjny delikatnie usuwa martwe komórki naskórka za pomocą ultradźwięków. Ten etap zabiegu oczyszcza skórę oraz odżywia ją poprzez rozszerzenie naczyń krwionośnych i poprawę krążenia.

#### Etap trzeci – infuzja

Po dokładnym oczyszczeniu skóry wykonujemy infuzję. Podczas zabiegu wprowadzamy substancje aktywne w głąb skóry. Dzięki temu odżywiamy ją oraz zabezpieczamy przed ponownym, nadmiernym powstawaniem wolnych rodników.

#### Etap czwarty – włączanie substancji aktywnych za pomocą głowicy ultradźwiękowej

Ultradźwięki zwiększają przepuszczalność błon komórkowych, rozszerzają naczynia krwionośne oraz polepszają metabolizm komórkowy.

#### Etap piąty – fala radiowa bipolarna

Fale radiowe bipolarne wywołują zjawisko diatermii w skórze. Poprzez przegrzanie włókien kolagenowych, co prowadzi do ich obkurczenia, uzyskujemy efekt zwiększonego napięcia skóry, poprawy jej elastyczności oraz owalu twarzy.

#### Etap szósty – masaż głowicą „zimny młotek”

Zakończeniem zabiegu jest chłodzący masaż zimną głowicą. Pozwala on ukoić skórę, obkurczyć naczynia krwionośne oraz zniwelować ewentualne zaczerwienienia.

### ULOTKI ZABIEGOWE W ZESTAWIE:

#### ZESTAW ZAWIERA:

- Urządzenie główne,
- głowicę infuzji tlenowej,
- zimny młotek,
- głowicę RF,
- głowicę ultradźwięków,
- głowicę oczyszczania wodorowego,
- szpatułę peelingu kawitacyjnego,
- końcówki oczyszczania wodorowego 9szt,
- plakat,
- zestaw ulotek dla klientów.
- kabel zasilający.

<b>Podciśnienie oczyszczania wodorowego</b>	<b>80cmHg</b>
<b>Podciśnienie hydrabrazji</b>	80cmHg
<b>Ciśnienie infuzji tlenowej</b>	1Bar
<b>Częstotliwość fali radiowej</b>	1Mhz
<b>Moc fali radiowej</b>	1W/cm <sup>2</sup>
<b>Częstotliwość Ultradźwięków</b>	1Mhz
<b>Moc ultradźwięków</b>	1Wcm <sup>2</sup>
<b>Poziom hałasu podczas pracy oczyszczania wodorowego</b>	45dB
<b>Napięcie</b>	220-230V
<b>Wyświetlacz</b>	LCD, dotykowy, 8 cali